

Frågor och svar om Optune

Vilken effekt har Optune?

Optune hämmar cancerns delning vilket kan leda till att cancern dör. En stor studie har visat att behandling med Optune, tillsammans med cytostatika, förlänger överlevnaden hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom.

Hur länge ska jag använda Optune?

I början av behandlingen med Optune diskuterar din läkare med dig hur länge behandlingen med Optune ska pågå. För att uppnå bästa möjliga behandlingssvar ska du använda Optune kontinuerligt.

Har Optune några biverkningar?

Behandlingen med Optune tolereras vanligtvis mycket väl. Den vanligaste biverkningen i samband med Optunebehandlingen är hudirritation på hjässan under arrayerna. Vanligtvis kan dessa hudirritationer hanteras väl utifrån rekommenderade åtgärder från din behandlande läkare och sjuksköterska.

Är Optune farligt för de som är i min närhet, till exempel barn?

Nej.

Påverkar Optune annan teknisk apparatur?

Nej.

Kan jag vara aktiv när jag har Optune?

Förutom vattensporter finns det inga restriktioner för fysiska aktiviteter som är specifikt kopplade till användningen av Optune.

Kan jag ha med Optune på resor?

Det går bra att resa med Optune. Om du ska flyga kan det behövas ett intyg, prata med din tekniska supportperson i god tid så får du hjälp.

Kan jag vara i solen när jag använder Optune?

Du ska skydda arrayerna från direkt solljus och hög värme, det kan du göra med en lätt och luftig huvudbonad, peruk eller ett parasoll.

Är det normalt om huvudet känns varmt när Optune är igång?

Ja, en del patienter upplever en värmekänsla. De flesta vänjer sig snabbt vid det.

Vad ska jag göra om arrayerna blir våta?

Om arrayerna blir våta måste du byta dem. Skydda arrayerna från vatten – ta med paraply eller något vattentätt för huvudet om det är risk för regn.

Måste jag ta av mig arrayerna vid undersökning med röntgen, datortomografi eller magnetkamera (MR)?

Ja.

Kan jag täcka arrayerna?

Ja, du kan ha en lätt och luftig huvudbonad eller peruk över arrayerna.

novocure[®]

©2023 Novocure GmbH.

Med ensamrätt.

Inom EU är Novocure och Optune registrerade varumärken som tillhör Novocure GmbH. SE-OPT-00059 April 2023